



Unterschiedliche Farben des Konnektors, je nach CH-Größe.



Hydrophile Oberfläche mit Urotonic™ Surface Technology für minimale Reibung während der gesamten Katheterisierung

Anwendungsbereich

Hydrophiler Einmalblasenkatheter zur Dilatation. Für den häuslichen oder klinischen Gebrauch.

Sterilisation und Haltbarkeit

Die Sterilisation der Katheter erfolgt durch Strahlung. Auf jeder Einzelverpackung befindet sich ein Verfallsdatum (Monat und Jahr).

Verpackung

30 Katheter pro Karton. Transportkarton mit 2x 30 Kathetern.

Materialzusammensetzung

Hydrophile Oberfläche: Polyvinyl Pyrrolidon (PVP) und Kochsalz (NaCl).

Katheter: Polyolefin-basiertes Elastomer (POBE).

Einzelne sterile Verpackung: Beschichtetes Papier, Verbundfolie aus Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE).

Produktsortiment

Reference	Type	Length	Size
406 16 15	LoFric® Dila-Cath™ Nelaton	40 cm	CH 16
406 18 15	LoFric® Dila-Cath™ Nelaton	40 cm	CH 18

LoFric® Dila-Cath™


Gebrauchsanweisung

Wichtige Informationen


Stellen Sie sicher, dass der Anwender eine ausführliche Einweisung in die Katheterisierung erhält.

Dies ist ein Produkt zur einmaligen Verwendung. Nach der Verwendung verschlechtert sich die Oberflächenbeschichtung und der Katheter ist nicht mehr steril.


Waschen Sie vor der Verwendung Ihre Hände mit Wasser und Seife.

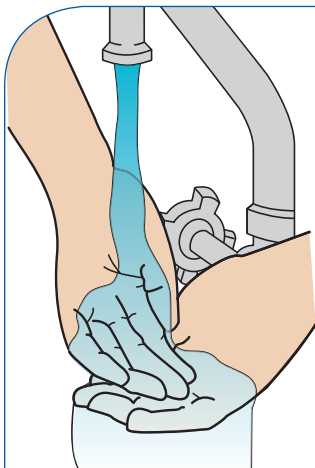


1. Waschen Sie sich Ihre Hände gründlich

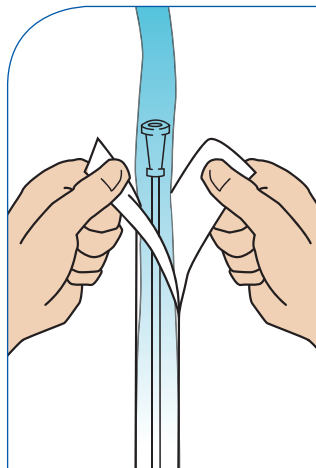


2. Öffnen Sie die Verpackung, indem Sie die Laschen am oberen Ende der Verpackung vorsichtig 5-6 cm auseinanderziehen. Füllen Sie Flüssigkeit (z.B. steriles Aqua dest. oder physiologische Kochsalzlösung) direkt in die Verpackung.

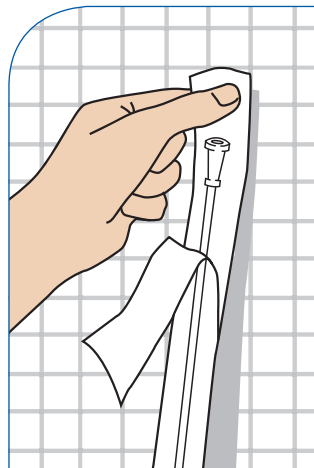


3. Die Verpackung besitzt ein Klebeetikett. Entfernen Sie die blaue Schutzfolie und kleben Sie die Verpackung auf einer geeigneten, trockenen Oberfläche fest.

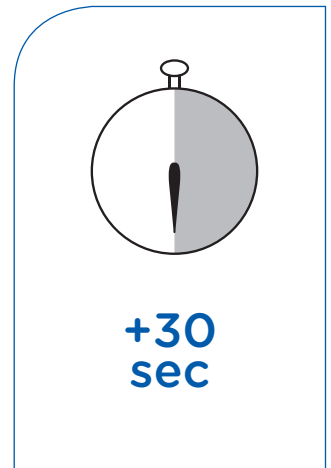

4. Lassen Sie den Katheter mindestens 30 Sekunden in der Flüssigkeit.

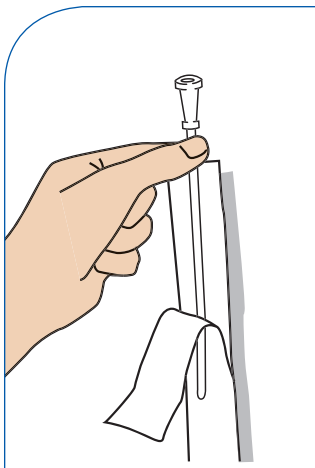

5. Entnehmen Sie den Katheter der Verpackung.

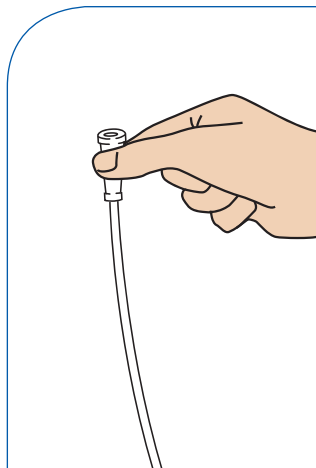

6. Führen Sie die Dilatation durch. Entsorgen Sie den Katheter nach Gebrauch.